


ISOAIR™ SNABBGUIDE

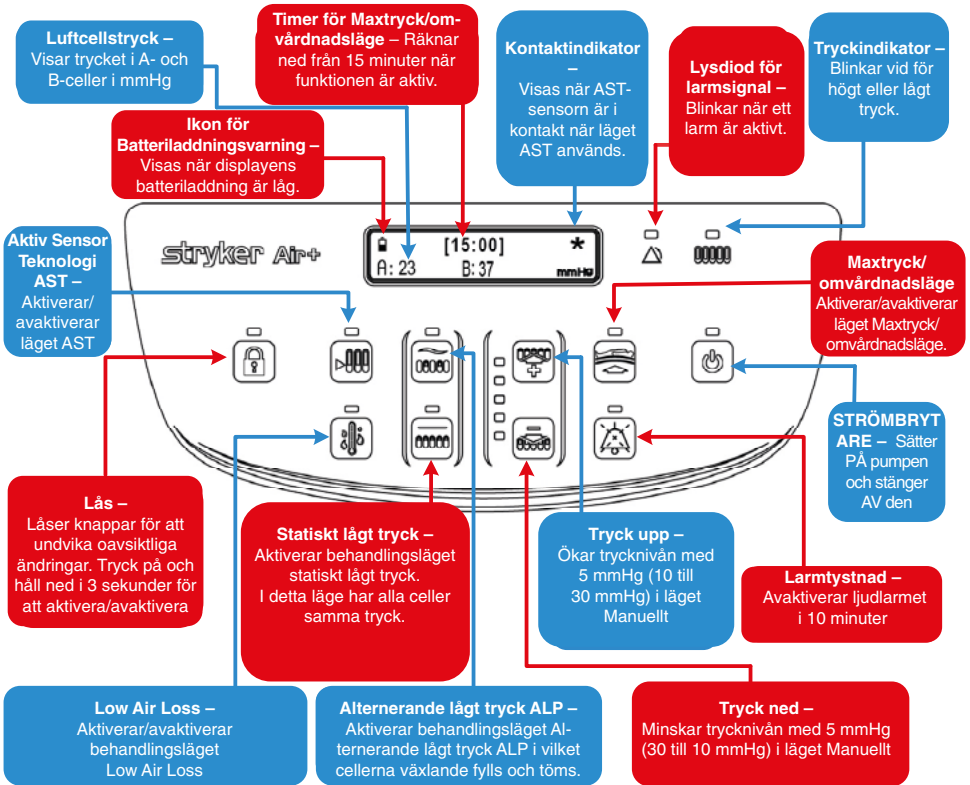



Larm/Varningar (i prioritetsordning för meddelanden)	Symtom	Rekommenderad åtgärd ⁴
1. Strömavbrott – Pumpen får ingen ström på grund av ett strömavbrott, trasig säkring eller eventuella interna skador.	<ul style="list-style-type: none"> – Pumpen startar inte. – Madrassen blåses inte upp. – Knappar svarar inte. – Lysdioden för Larmsignal blinkar och lysdioden för knappen Strömbrytare blinkar². 	<ul style="list-style-type: none"> – Kontrollera att strömkabeln är ansluten, att Strömbrytaren är PÅ och lysdioden för Strömbrytaren är tänd (vit för vänteläge, grön för enhet i drift).
2. Maskinvarufel – Pumpen har upptäckt ett internt maskinvarufel.	<ul style="list-style-type: none"> – Lysdioden för Larmsignal blinkar och lysdioden för knappen Strömbrytare lyser kontinuerligt. 	<ul style="list-style-type: none"> – Stäng av strömmen och koppla på den igen.
3. Knapp som fastnat – Styrenheten har upptäckt att en knapp har varit kontinuerligt aktiverad i mer än 15 sekunder.	<ul style="list-style-type: none"> – Knappar svarar inte. – Lysdioden för Larmsignal blinkar² och lysdioden för Knappen som fastnat blinkar snabbt³. 	<ul style="list-style-type: none"> – Tryck på och släpp knappen med den snabbt blinkande lysdioden för att lossa Knappen som fastnat.
4. AST-anslutningsfel – Styrenheten har upptäckt att AST-kabeln är fränkopplad.	<ul style="list-style-type: none"> – Lysdioden för Larmsignal blinkar² och lysdioden för knappen AST blinkar. 	<ul style="list-style-type: none"> – Kontrollera att AST-kontakten är helt införd i AST-uttaget. – Växla med knappen AST (AV/PÅ) för att se om tillståndet försvinner.
5. AST-sensor - AST-sensorn är i kontakt mer än 15 minuter vid drift i låget AST.	<ul style="list-style-type: none"> – Lysdioden för Larmsignal blinkar², lysdioden för knappen AST blinkar och lysdioden för Tryckindikatorn blinkar. 	<ul style="list-style-type: none"> – Minska HOB-vinkeln om patienten är i fowler-läge. – Öppna överdragets dragkedja och kontrollera att AST-luftcellerna är korrekt placerade under patienten. – Utför en handkontroll för att säkerställa att patienten inte bottnat.
6. Trycklarm – Ett tillstånd med högt eller lågt tryck finns i en luftcell eller i madrassen.	<ul style="list-style-type: none"> – Lysdioden för Larmsignal blinkar² och lysdioden för Tryckindikatorn blinkar. 	<ul style="list-style-type: none"> – Kontrollera att CPR-anslutningen är korrekt insatt i styrenheten. – Kontrollera om det finns veck på slangarna från CPR-anslutningen till stödytan. – Öppna dragkedjan på överdraget, kontrollera luftcellerna, slangar och anslutningar med avseende på möjliga läckage.
7. Low Air Loss lågt flöde – Flödet är under minsta förväntade tröskelvärde under 5 sekunder.	<ul style="list-style-type: none"> – Lysdioden för Larmsignal blinkar², lysdioden för knappen MM blinkar och lysdioden för Tryckindikatorn blinkar. 	<ul style="list-style-type: none"> – Öppna dragkedjan på madrassöverdraget. – Kontrollera om luftflödet är blockerat längs Low Air Loss-slangarna inuti madrassen. (Se sidan 16 eller 17).
8. Låsvarning – En knapp trycks ned när funktionen LÅS är aktiv.	<ul style="list-style-type: none"> – Knappar svarar inte. – Lysdioden för knappen Lås blinkar snabbt³. 	<ul style="list-style-type: none"> – Om det behövs aktiveras funktionen LÅS genom att trycka på och hålla ned knappen LÅS i 3 sekunder.
9. Batteriförsvarning för display – Ett fel på displayens batteri har upptäckts.	<ul style="list-style-type: none"> – Batteriikonen visas på LCDdisplayen. 	<ul style="list-style-type: none"> – Se till att ström ansluts under minst fem timmar.

1 – Alla larm klassificeras som Medium prioritet enligt IEC 60601-1-8

2 – Blinkar = var 2:a sekund

3 – Blinkar snabbt = 10 gånger per sekund

4 – Om larmtillståndet kvarstår, kontakta Gates kundtjänst tel. 0371-318 00